



Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 09:33

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-equine-fusion-recovery-nowa-wersja-20-p-147.html>




## Buty Equine Fusion Recovery - nowa wersja 2.0

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena brutto  | <b>775,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>630,08 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>5 dni</b>     |

### Opis produktu

Buty Equine Fusion Recovery 2.0

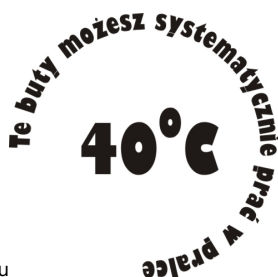

Nowe i ulepszone buty rehabilitacyjne do rehabilitacji i transportu

Buty Recovery Shoe zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić optymalną opiekę Twojemu koniowi podczas rehabilitacji i transportu, a jednocześnie zadbać o jego doskonały wygląd. Cholewka wykonana jest z wodoodpornego, elastycznego neoprenu, a wodoodporny zamek błyskawiczny z przodu pozwala kontrolować środowisko kopyta podczas rekonwalescencji. Taka konstrukcja umożliwia lekarzom weterynarii podawanie leków lub innych płynów bezpośrednio na kopyto bez ryzyka zakażenia. Elastyczny pasek i unikalna konstrukcja piętki wspierają nieograniczony, naturalny ruch piętki, zwiększając komfort i mobilność.

Miękka gumowa podeszwa pozwala kopytu wnikać w materiał, zapewniając pełny kontakt, który wspomaga naturalny przepływ krwi i prawidłowe funkcjonowanie kopyta. Idealne dla koni rekonwalescencji po schorzeniach takich jak ochwat, nadwrażliwość kopyt, ropnie lub w trakcie leczenia, buty Recovery Shoe są łatwe w użyciu dzięki systemowi zapięcia jednym paskiem. Wyższy niż zwykle profil zapewnia pełną ochronę kopyta, co czyni je niezawodnym wyborem do rehabilitacji, użytku weterynaryjnego w klinikach i transportu.

Dostępne również ocjonalni z dopasowanymi wkładkami z wełny naturalnej, tu dokładny opis:

<https://konwbutach.com.pl/wkladki-z-welny-naturalnej-przyciete-do-butow-1-para-p-51.html>, a wybór wersji możliwy jest także przy wyborze rozmiaru i koloru butów.

**Łatwy w użyciu:**



- Łatwe otwieranie buta w celu jego założenia.
- Elastyczny neopren z zamkiem błyskawicznym i elastycznym paskiem do zaciśnięcia.

#### Dopasowanie:

- Elastyczna górna część umożliwia dopasowanie do kopyt o nietypowym kształcie, formie i kątach.
- Model ten jest polecany do rehabilitacji i transportu.

#### Mocowanie:

- Dzięki regulowanej cholewce i systemowi zapięć wraz z zamkiem błyskawicznym, można ściśle zapiąć podkowę wokół kopyta, aby nie spadała.

#### Komfort:

- Górna część wykonana jest z wodoodpornego, elastycznego neoprenu. Wodoodporny zamek błyskawiczny i elastyczny pasek w połączeniu z konstrukcją piętki umożliwiają swobodny, naturalny ruch kopyta.
- Górna część jest miękka i wygodna dla konia.

#### Tabela rozmiarów:

| Equine Fusion Recovery 2.0 |              |                |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Rozmiar                    | Długość w mm | Szerokość w mm |
| 7                          | 66-75        | 70             |
| 8                          | 76-85        | 80             |
| 9                          | 86-95        | 90             |
| 10                         | 96-105       | 100            |
| 11                         | 106-115      | 110            |
| 12                         | 116-125      | 120            |
| 13                         | 126-135      | 130            |
| 14                         | 136-145      | 140            |
| 15                         | 146-155      | 150            |
| 16                         | 156-165      | 160            |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

**Kolor:** czarny , czerwony

**Wkładka - wybierz:** wełna naturalna - 4mm , wełna naturalna - 6mm , wełna naturalna - wykonanie specjalne - wycięcie według rysunku

## Jak prawidłowo mierzyć kopyta

### Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym




cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

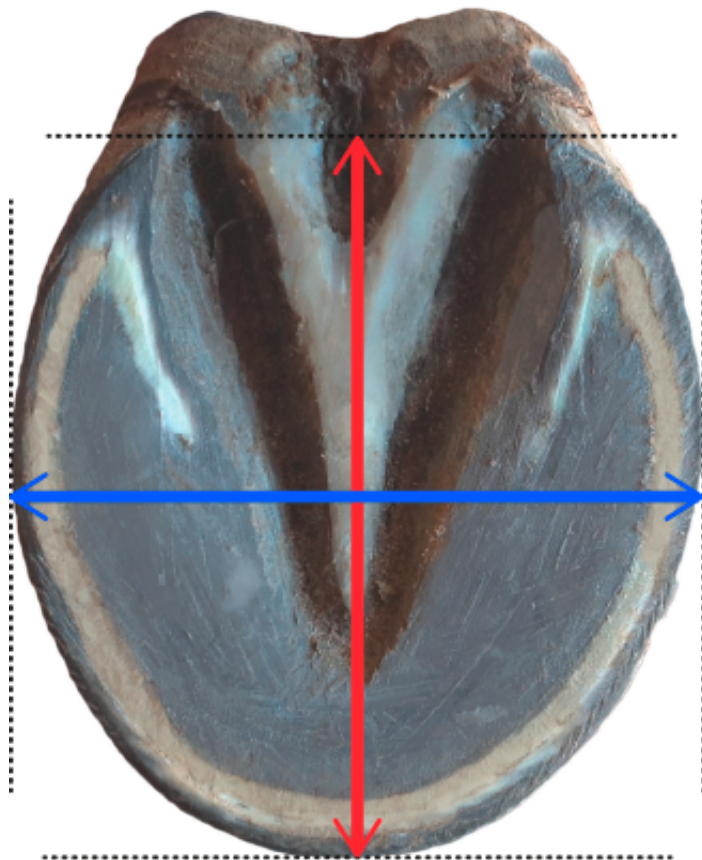

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

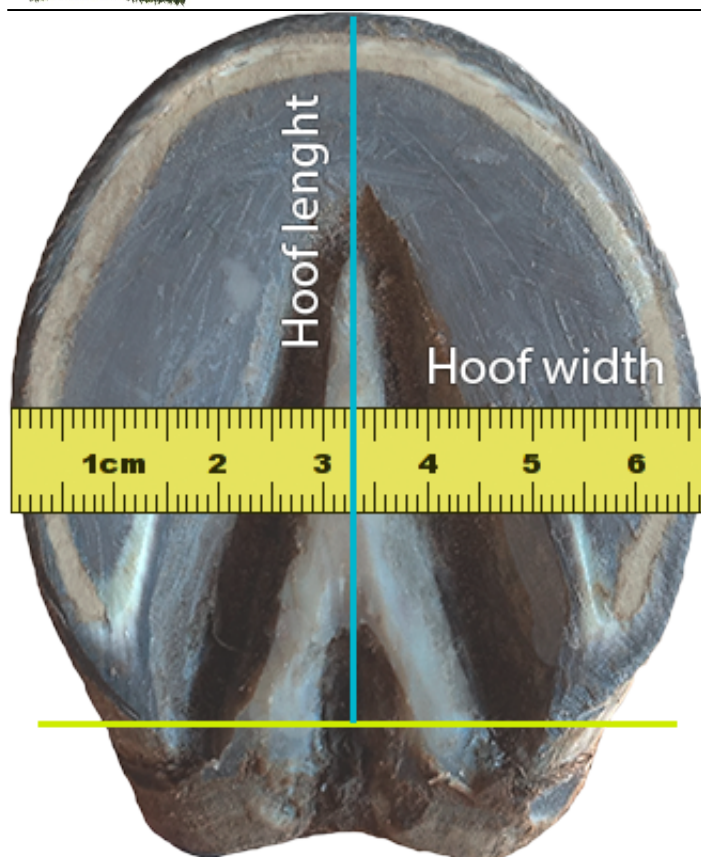


#### Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

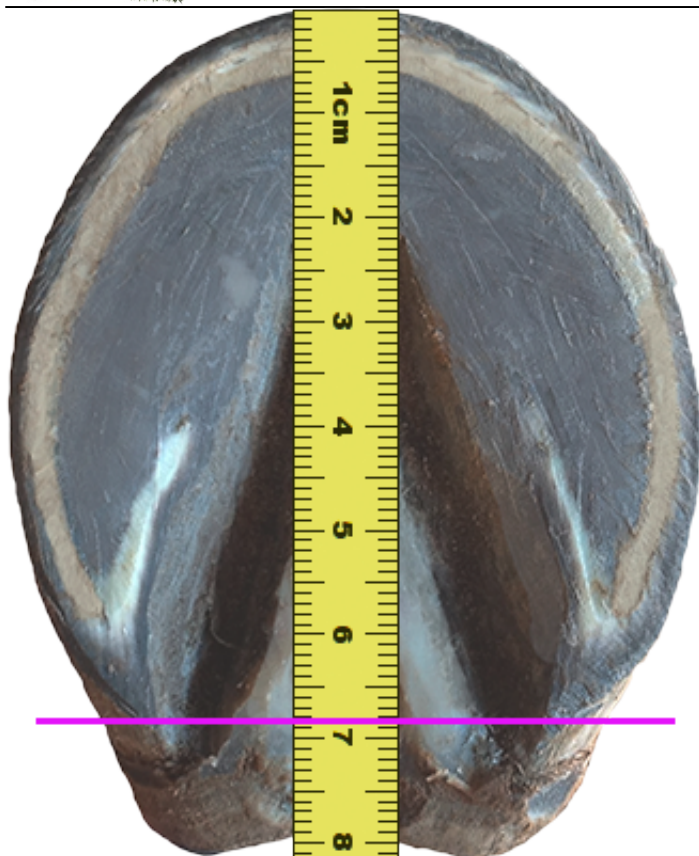

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Buty Equine Fusion Recovery - przewodnik użytkownika