

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/easyboots-zip-p-65.html>



EasyBoots Zip

Cena	243,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SB-EBZ-xx
Kod producenta	SB-EBZ-xx

Opis produktu



Buty EasyBoot Zip

Łatwy w zakładaniu Easyboot Zip to prosty, wsuwany but przeznaczony do ochrony kopyt. To bezpieczniejsza alternatywa dla niezgrabnych okładów na stopy. Zamek błyskawiczny jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na stoiskach lub na stanowiskach stojących. Nie jest przeznaczony do jazdy konnej ani ćwiczeń (wyłącznie do celów terapeutycznych).

Dostępne również ocjonalni z dopasowanymi wkładkami z wełny naturalnej, tu dokładny opis: <https://konwbutach.com.pl/wkladki-z-welny-naturalnej-przyciete-do-butow-1-para-p-51.html>, a wybór wersji możliwy jest także przy wyborze rozmiaru butów.

Cena za 1 szt. .

Zamek błyskawiczny Easyboot – cale		
Rozmiar	Szerokość w calach	Długość w calach
0	3" - 3 3/16"	3" - 3 3/16"
1	3 7/8" - 4 11/16"	3 7/8" - 4 11/16"
2	4 3/4" - 5 5/16"	4 3/4" - 5 5/16"
3	5 3/8" - 6 3/8"	5 3/8" - 6 3/8"
4	6 7/16" - 7 1/16"	6 7/16" - 7 1/16"

Zamek Easyboot – MM		
Rozmiar	Szerokość w mm	Długość w mm
0	77-97 mm	77-97 mm
1	98-119mm	98-119mm
2	120-136 mm	120-136 mm
3	137-162 mm	137-162 mm
4	163-180 mm	163-180 mm



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2 , 3 , 4

Wkładka - wybierz: bez wkładki , wełna naturalna - 10mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - 4mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - 6mm (+ 30,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosińki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

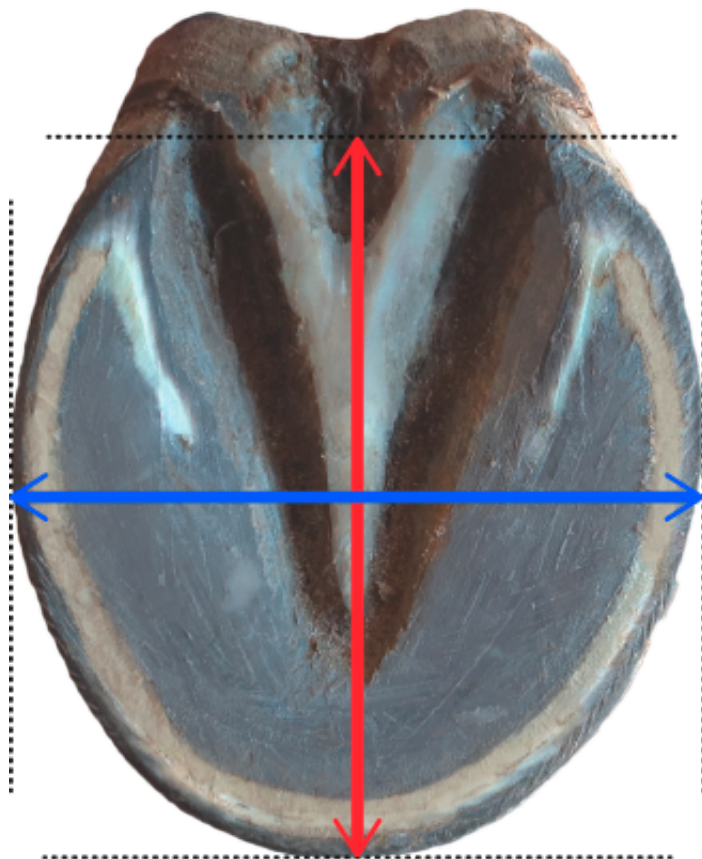

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

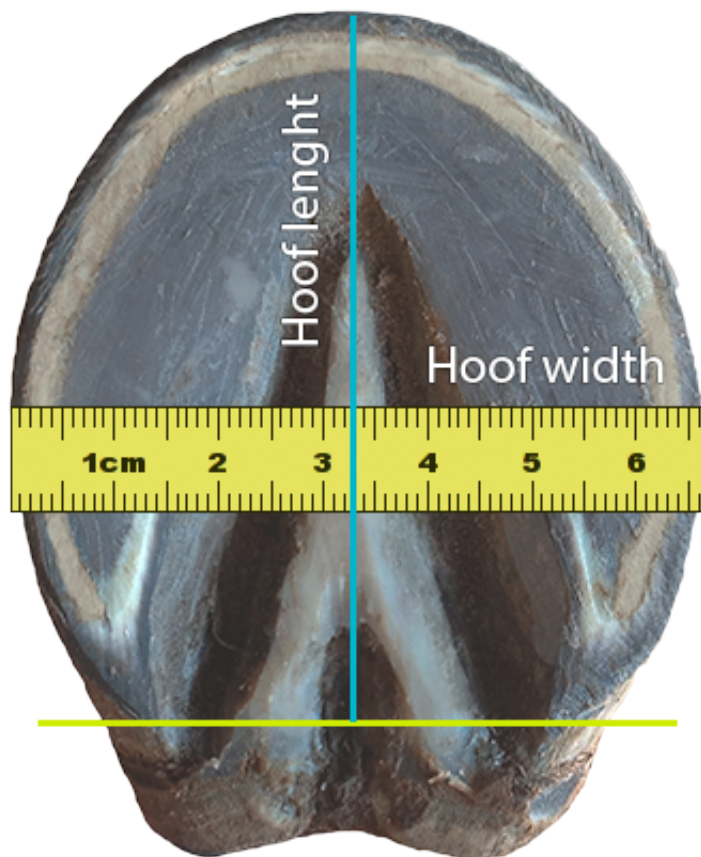


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

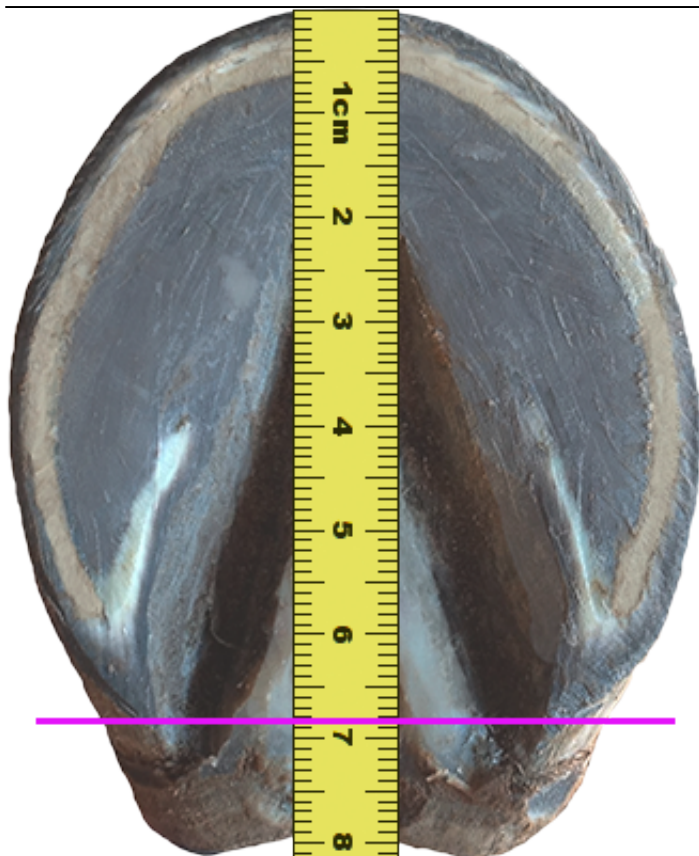

Przypadki specjalne; kopyta z nie zrównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nie zrównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Warto pamiętać, że Easyboot Cloud, jako but o dużej tolerancji wymiarów, przeznaczony do celów rehabilitacyjnych, często będzie lepiej spełniał swoją rolę, jeśli nie będzie ściśle dopasowany; w przypadku gdy wymiary kopyta wskazują na granicę rozmiarów, należy wybrać rozmiar większy. Umożliwi do zastosowanie buta z indywidualnie dobranymi wkładkami, opatrunkiem itd.

Easyboot Cloud - przewodnik użytkowania