

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/podkowy-easyshoe-step-3d-p-100.html>

Podkowy EasyShoe Step 3D



Cena	226,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	5 dni
--------------	--------------

Opis produktu

EasyShoe Step 3D

EasyShoe 3D to kompozytowa, klejona podkowa przeznaczona do sportów torowych i areny. EasyShoe 3D jest zintegrowana z podporą łuku przez 3D HoofCare i wypustkami na palce, co ułatwia klejenie. Po prostu postaw konia w podkowie i przymocuj wypustki za pomocą Super Glue. Nie jest wymagane spawanie. Dostępne zarówno w przednich, jak i tylnych wzorach, rozmiary 118F-134F i 110H-126H.

Sprzedawane w parach.

EasyShoe 3D Size Charts

EasyShoe 3D - Front Sizes		
Size	Width in mm	Length in mm
118F	112-118mm	128mm
122F	116-122mm	132mm
126F	120-126mm	136mm
130F	124-130mm	140mm
134F	128-134mm	145mm

EasyShoe 3D - Hind Sizes		
Size	Width in mm	Length in mm
110H	104-110mm	124mm
114H	108-114mm	128mm
118H	112-118mm	133mm
122H	116-122mm	137mm
126H	120-126mm	142mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 118F , 118H , 122F , 122H , 126F , 126H , 130F , 134F

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

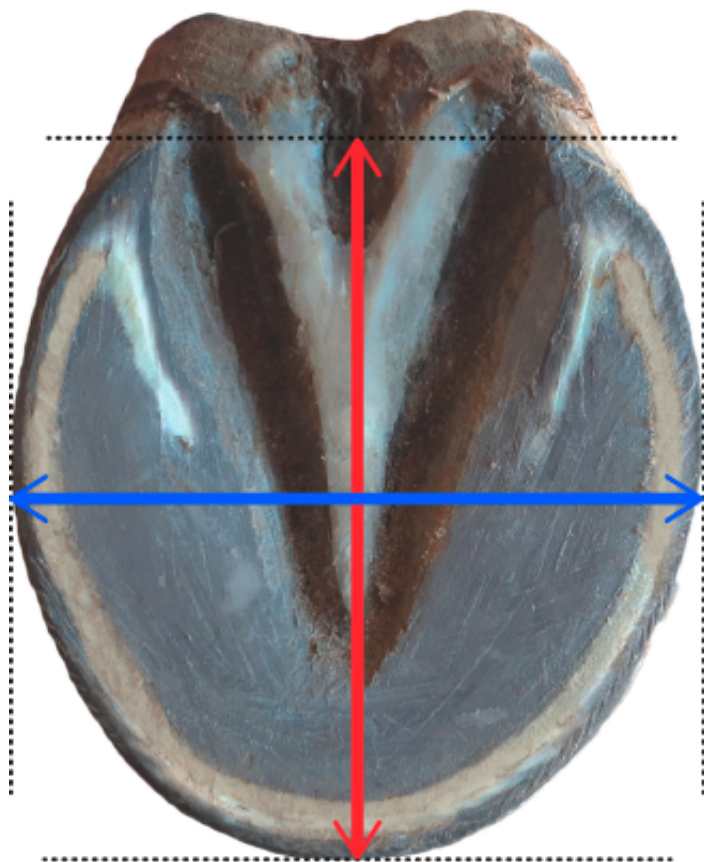

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

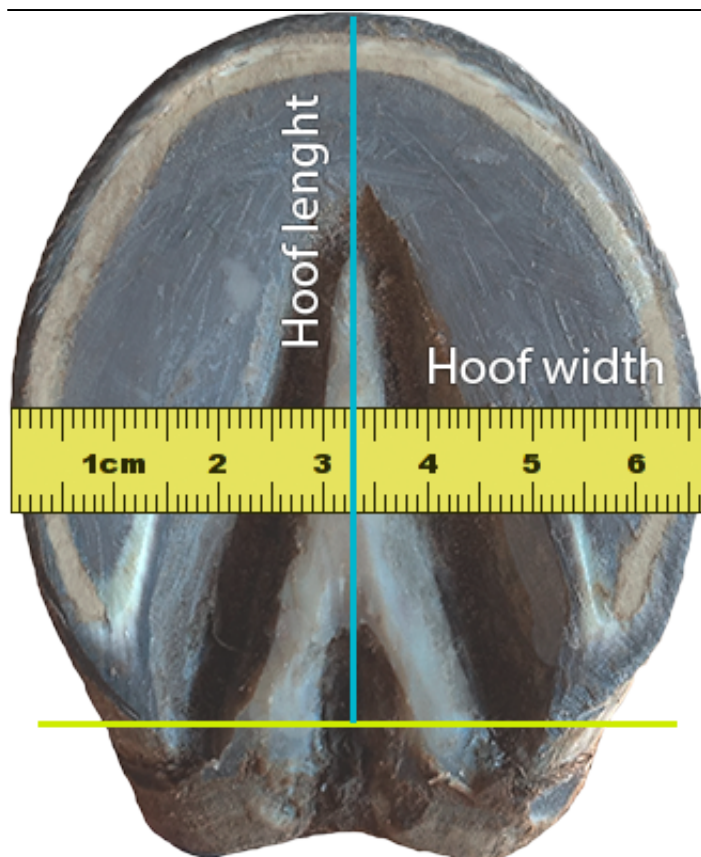


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

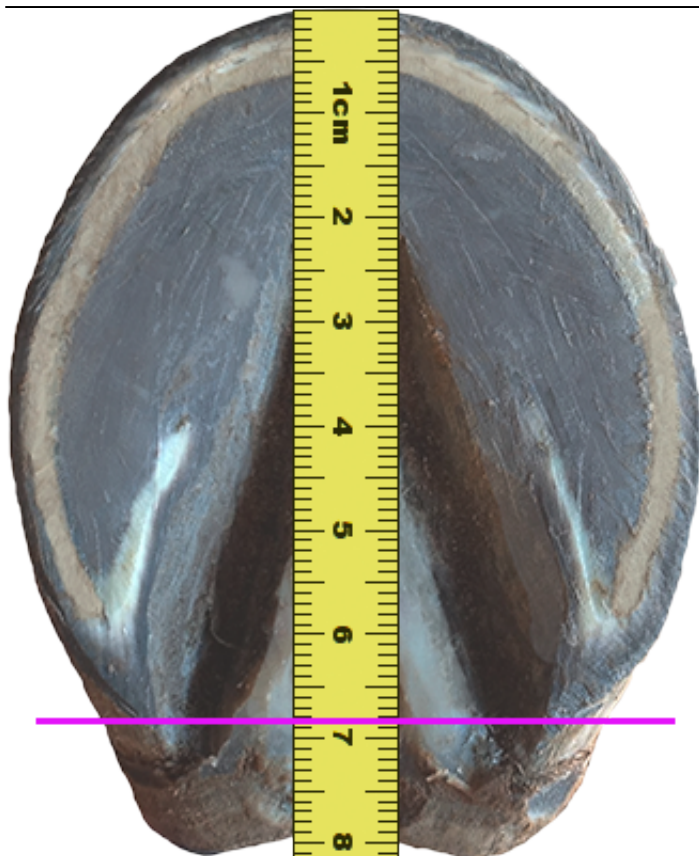

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

EasyShoe Step 3D - wprowadzenie

Zakładanie podkowy Easyshoe Step 3D

Podkowy Easyshoe Step 3D - zdejmowanie i kolejne użycia
