

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/podkowy-easyshoe-triple-d-p-183.html>

Podkowy EasyShoe Triple D



Cena	460,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Podkowy EasyShoe Triple D - 1 para

EasyShoe Triple D to buty klejone o potrójnej gęstości ze zintegrowanymi mankietami, przeznaczone do wypełniania szczelin klejem. Te hybrydowe buty klejone oferują 3-stopniowy klin i mechanizm rolkowy w podeszwie. Zaprojektowane z myślą o terapii. Podeszwę można modyfikować na szlifierce, dzięki czemu buty nadają się do stosowania w dyscyplinach wyczynowych, takich jak ujeżdżenie. Docelowo dostępne w rozmiarach 110-146 mm, obecnie w rozmiarach 130, 134, 138, 142.

Z platformą Triple Density Platform™

Nowy system podeszwy zewnętrznej EasyCare składa się z trzech warstw zaprojektowanych tak, aby odpowiadały sposobowi poruszania się koni:

- Cholewka z przezroczystego poliuretanu: zwiększa wytrzymałość strukturalną i niezawodnie łączy się z klejami do kopyt, takimi jak HoofLox Adhesive, HoofLox Urethane i HoofLox Platinum.
- Miękka gumowa podeszwa środkowa: amortyzuje uderzenia i równomiernie rozkłada obciążenie na podeszwie, bieżniku i żabce.
- Wytrzymała gumowa podeszwa zewnętrzna: zapewnia przyczepność, odporność na zużycie i stabilność skrętną.

Razem tworzą one progresywną reakcję – miękkie w miejscu, gdzie koń ląduje, twarde w miejscu, gdzie się odpycha, mocne w miejscu, gdzie łączy się z kopytem.

EasyShoe Triple D		
Size	Width in mm	Length in mm
110	104-110mm	130mm
114	108-114mm	133mm
118	112-118mm	137mm
122	116-122mm	141mm
126	120-126mm	146mm
130	124-130mm	151mm
134	128-134mm	155mm
138	132-138mm	159mm
142	136-142mm	164mm
146	140-146mm	168mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 130 , 134 , 138 , 142

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

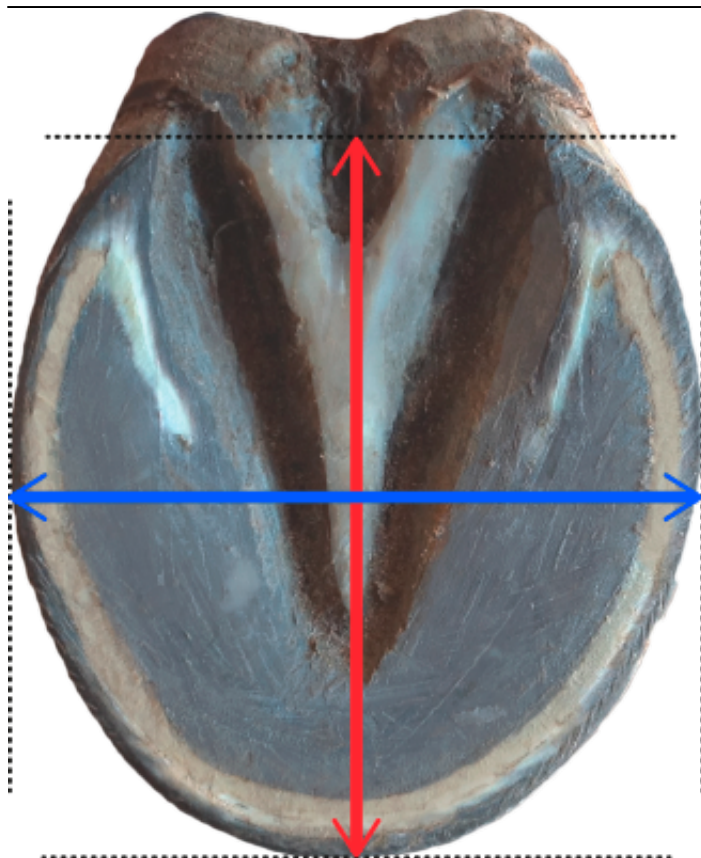

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

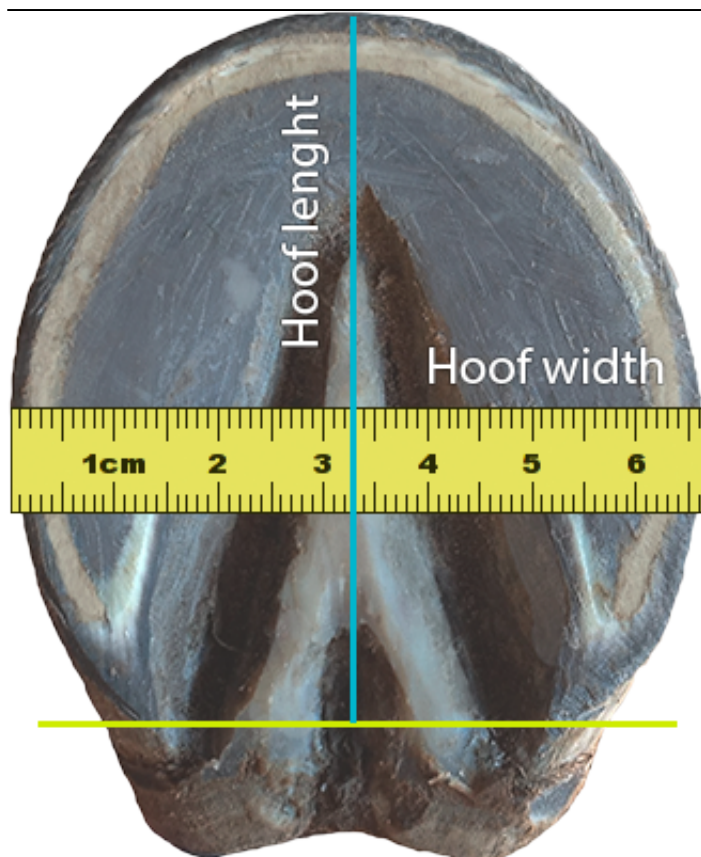


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

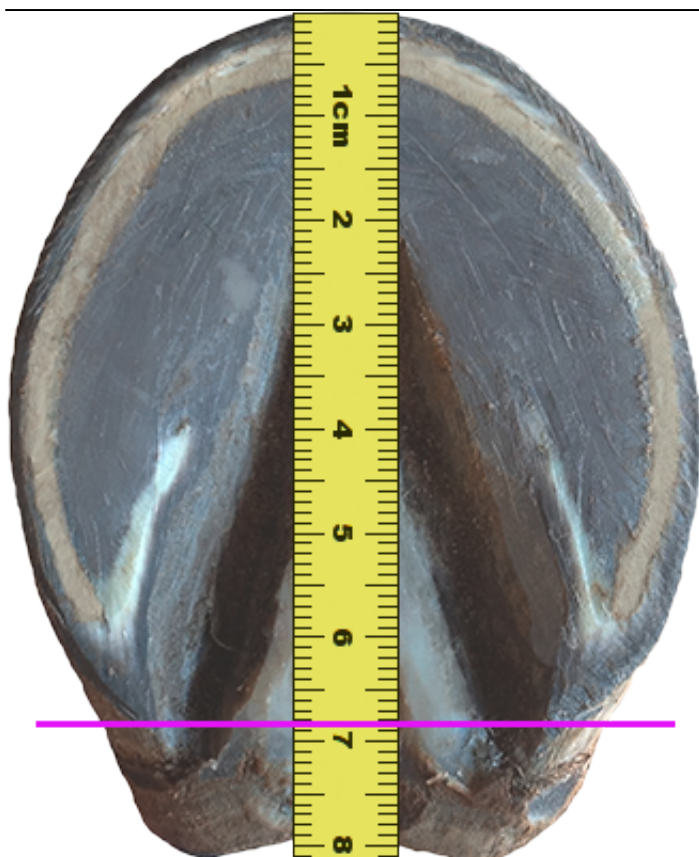

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Materiały filmowe i prezentacyjne Easycare Inc. serii Triple D