



Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 14:25

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/podkowy-easyshoe-versa-grip-glue-p-159.html>

Podkowy EasyShoe Versa Grip Glue



Cena brutto	240,00 zł
Cena netto	195,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

EasyShoe Versa Grip Glue - 1 para

EasyShoe Versa Grip Glue to klejona podkowa z poliuretanu o takich samych właściwościach jak EasyShoe Versa Grip Light, ale ze zintegrowanym mankietem umożliwiającym natychmiastowe przyklejenie.

Zintegrowany mankiet posiada liczne otwory do aplikacji kleju, co sprawia, że proces klejenia jest szybki i łatwy. Wystarczy postawić konia w podkuciu i wstrzyknąć klej przez otwory. Klej Versa Grip Glue jest przeznaczony do wypełniania szczelin klejami (akryłowymi i poliuretanowymi).

Versa Grip Glue nadaje się do celów terapeutycznych i każdej dyscypliny jeździeckiej.

Sprzedawane parami. Dostępne w rozmiarach 74-150 mm (przód) i 90-150 mm (tył).



EasyShoe Versa Grip Glue Size Charts

EasyShoe Versa Grip Glue - Front Sizes		
Size	Width in mm	Length in mm
74F	70-74mm	81mm
78F	74-78mm	85mm
82F	78-82mm	90mm
86F	82-86mm	95mm
90F	86-90mm	98mm
94F	90-94mm	102mm
98F	94-98mm	106mm
102F	96-102mm	110mm
106F	100-106mm	114mm
110F	104-110mm	119mm
114F	108-114mm	123mm
118F	112-118mm	128mm
122F	116-122mm	132mm
126F	120-126mm	136mm
130F	124-130mm	140mm
134F	128-134mm	145mm
138F	132-138mm	150mm
142F	136-142mm	154mm
146F	140-146mm	158mm
150F	144-150mm	163mm

EasyShoe Versa Grip Glue - Hind Sizes		
Size	Width in mm	Length in mm
90H	86-90mm	102mm
94H	90-94mm	106mm
98H	94-98mm	110mm
102H	96-102mm	115mm
106H	100-106mm	119mm
110H	104-110mm	124mm
114H	108-114mm	128mm
118H	112-118mm	133mm
122H	116-122mm	137mm
126H	120-126mm	142mm
130H	124-130mm	146mm
134H	128-134mm	151mm
138H	132-138mm	156mm
142H	136-142mm	160mm
146H	140-146mm	165mm
150H	144-150mm	170mm

***Patent w toku.**

[Dowiedz się, jak nakładać i usuwać klej Versa Grip](#)

[Zobacz, co właściciele koni i jeźdźcy mówią o kleju Versa Grip](#)

[Dowiedz się, jak barwić podkowy Versa Grip](#)

[Porównaj i zestaw ze sobą serię Versa Grip](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 102F , 102H , 106F , 106H , 110F , 110H , 114F , 114H , 118F , 118H , 122F , 122H , 126F , 126H , 130F , 130H ,



134F , 134H , 138F , 138H , 142F , 142H , 146F , 146H , 150F , 150H , 74F , 78F , 82F , 86F , 90F , 90H , 94F , 94H , 98F , 98H

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

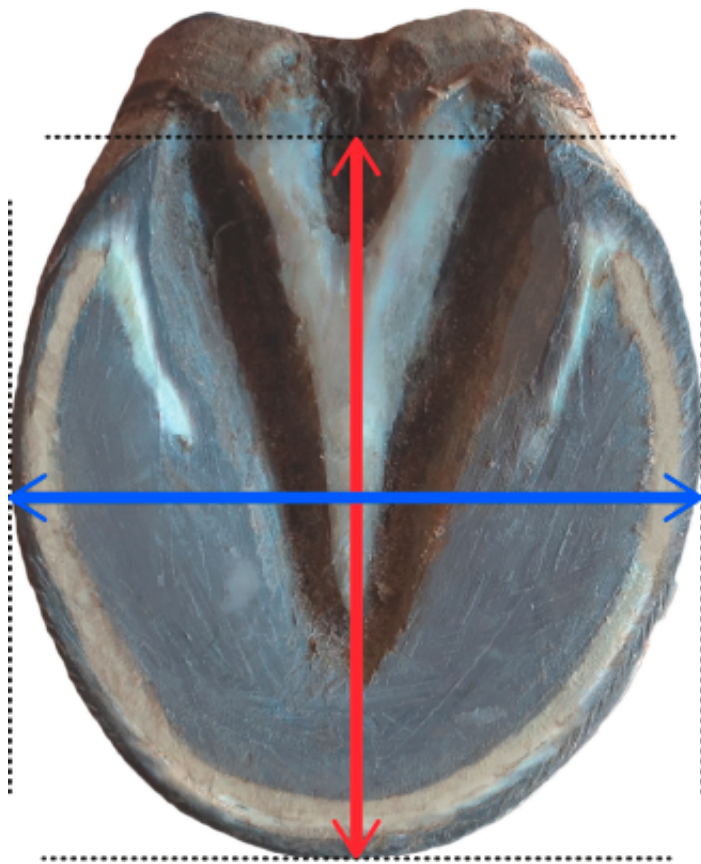

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

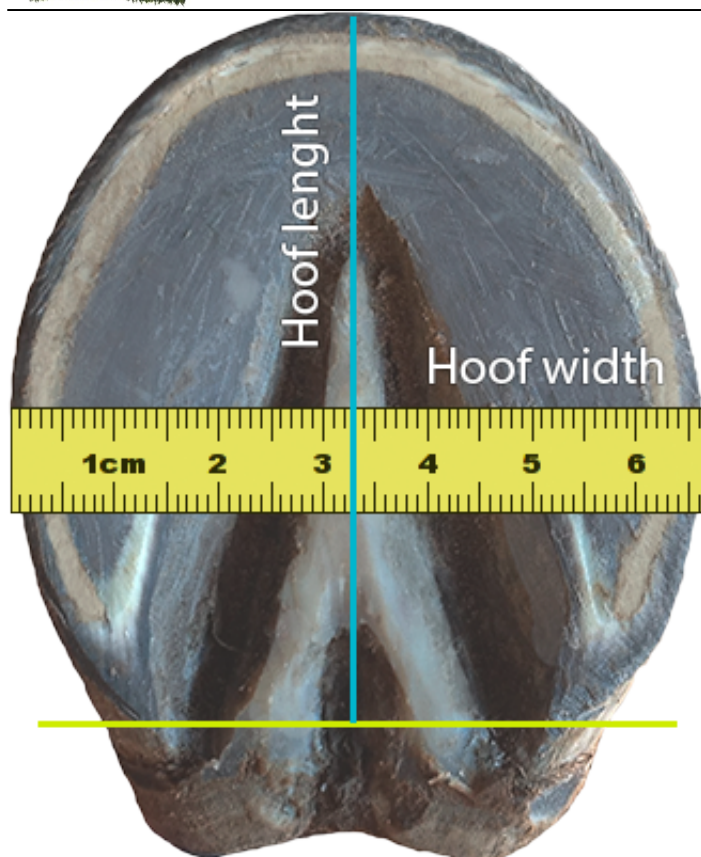


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

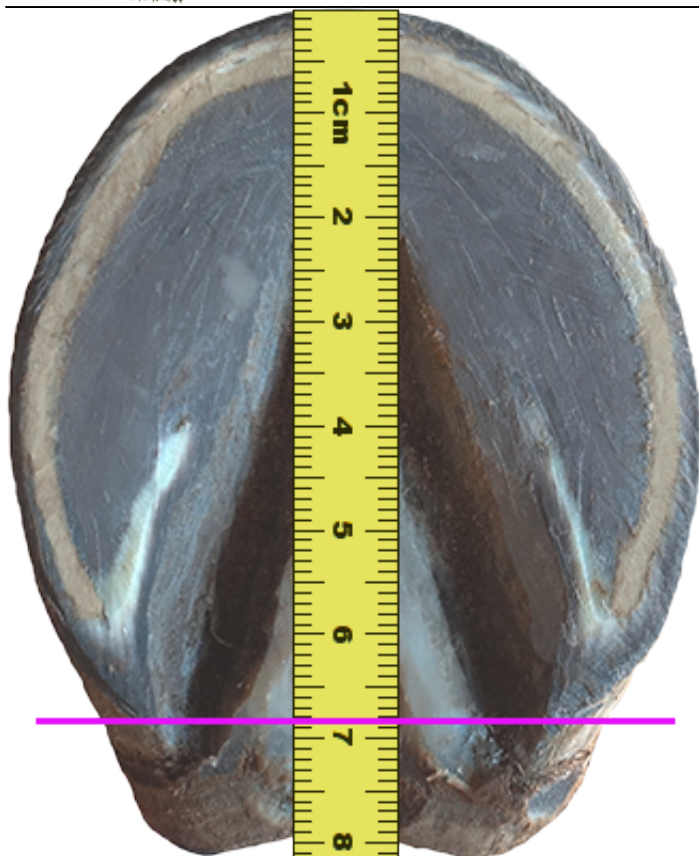

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

EasyShoe Versa Grip Glue - aplikacja

Zdejmowanie podkowy Easyshoe Versagrip Glue

Przygotowanie kopyt - rady i sztuczki