

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/system-krosscheck-zestaw-do-oceny-nerownowagi-obciazen-kopyt-p-161.html>



System Krosscheck - zestaw do oceny nierównowagi obciążeń kopyt

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu

System Krosscheck™ - zestaw do oceny nierównowagi obciążeń kopyt dla lekarzy weterynarii, podkuwaczy i fizjoterapeutów

Urządzenie do Testu Dźwigniowego Krosscheck™ (KLTD) zostało zaprojektowane jako uzupełniające narzędzie diagnostyczne dla lekarzy weterynarii i kowali. Narzędzie to można włączyć do standardowego procesu oceny kulawizny, aby zarówno dostarczyć informacji niezbędnych do postawienia diagnozy, jak i przyczynić się do ustrukturyzowania planu leczenia.

Połączenie KLTD z oceną chodu, blokadami nerwów, testami zgięcia, zdjęciami rentgenowskimi i innymi technikami obrazowania diagnostycznego pozwala na lepszą precyzję diagnozy. Co więcej, stosowanie Urządzenia do Testu Dźwigniowego sprzyja bliskiej współpracy i zaangażowaniu lekarza weterynarii, kowala, właściciela konia i konia. Wszyscy członkowie tego zespołu mogą wnieść swój wkład, który ostatecznie pomoże w korekcie lub przynajmniej poprawie komfortu i dobrostanu konia.

Poprzez kontrolowany nacisk na osiem różnych punktów wokół stawu kopytowego (stawu kopytowego), Krosscheck™ pomaga zidentyfikować wzorce bólu i natychmiast ocenić, co faktycznie zapewnia komfort i ulgę w bólu. Zapewnia to bardziej ukierunkowane wskazówki do dalszych badań i leczenia – krótko mówiąc, jest to inteligentny, bezpieczny i jedynie minimalnie inwazyjny etap procesu diagnostycznego.

Zestaw do testowania zawiera:

- buty z regulowaną dźwignią oraz pasami do zamocowania w czterech rozmiarach od 101,6mm (4") do 152,4mm (6")
- kompletną instrukcję na płycie DVD oraz podręcznik
- 10 arkuszy do zbierania danych
- torbę transportową



SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY KLINOWY SPINNER
MOŻE BYĆ OBRÓCONY W 8 RÓŻNYCH STREFACH POD STOPĄ, ABY UZYSKAĆ NAJSKUTECZNIEJSZE WYNIKI TESTÓW DŹWIGNI

WPUSZCZONE RÓWKI W PŁYTCIE PODSTAWOWEJ MOCNO UTRZYMUJĄ ZAKLINIONY WIRNIK NA MIEJSCU

ZAPROJEKTOWANE W CELU UŁATWIENIA ZBIORU INFORMACJI POPRZECZ BADANIE TKANKI ŁĄCZNEJ I STAWÓW KOŃCZYNY DAŁSZEJ U KONIA.
"ZAPYTAJ KONIA..."

SZTYWNE, FORMOWANE WKŁADKI POMAGAJĄ MOCNO UTRZYMAĆ STOPĘ NA MIEJSCU I PRZYMOCOWAĆ PASKI DO PŁYTY PODSTAWOWEJ

ELASTYCZNE, DOPASOWANE PASKI WYGODNIE UTRZYMUJĄ STOPĘ

PODNOSENIE OBROTU ZOSTAŁO PRZEBADANE I PRZETESTOWANE, ABY ZAPEWNIĆ NAJSKUTECZNIEJSZE WYNIKI

KROSSCHECKTM TO URZĄDZENIE DO TESTOWANIA RUCHU U KONI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I PROFESJONALNYCH KOWALI W CELU WSPARCIA I UZUPEŁNIENIA WETERYNARYJNYCH ZAJĘĆ DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH.

ZALECANE ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA DO TESTOWANIA DŹWIGNI KROSSCHECK™:

- Leverage Testing uzupełnia aktualne techniki diagnostyczne stosowane w standardowym diagnostyce weterynaryjnej. Jest najbardziej skuteczny w połączeniu z diagnostycznymi blokadami nerwów, testami zgięcia, zdjęciami rentgenowskimi, ultrasonografią i rezonansem magnetycznym.
- Podobnie jak w przypadku diagnostycznych blokad nerwowych i testów zgięcia, test dźwigni może pomóc zlokalizować ból i dyskomfort, które najprawdopodobniej przyczyniają się do obecnego poziomu kulawizny. Jednak w przeciwieństwie do innych metod lokalizacji bólu, test dźwigni pozwala również odkryć, co poprawi komfort konia i złagodzi ból.
- Badanie dźwigniowe, stosowane przed diagnostyką obrazową (radiografia, USG lub MRI), może zapewnić bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące tego, na czym skupić badania obrazowe. Na przykład, nasze doświadczenie z udokumentowanymi przypadkami zebranymi w ciągu ostatnich 2 lat powiązało spójne wyniki badania dźwigniowego z ostateczną diagnozą: uszkodzeń więzadeł pobocznych, uszkodzeń więzadeł trzyczekowatych pobocznych, uszkodzeń ścięgien zginaczy palców głębokich, choroby kości pierścieniowej i stawu kopytowego. Dzięki ciągłej dokumentacji wyników badania dźwigniowego, popartej potwierdzoną diagnozą, badanie dźwigniowe pozwoli na bardziej definitywną identyfikację patologii.
- Badanie dźwigniowe może pomóc potwierdzić, czy zmiany wykryte za pomocą określonych technik obrazowania rzeczywiście przyczyniają się do ostrej kulawizny, czy też zmiany te mają charakter przewlekły i nie są przyczyną bieżącej kulawizny.

Prezentacja systemu Krosscheck - wprowadzenie

Prezentacja systemu Krosscheck - ulotka



KROSS CHECK

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI

WSPARCIE DIAGNOSTYCZNE I URZĄDZENIE TESTOWE



SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY KLINOWY SPINNER
MOŻE BYĆ OBRÓCONY W 8 RÓŻNYCH
STREFACH POD STOPIĄ, ABY UZYSKAĆ
NAJSKUTECZNIEJSZE
WYNIKI TESTÓW DŹWIGNI



WPUSZCZONE ROWKI W PŁYTCIE PODSTAWOWEJ MOCNO
UTRZYMUJĄ ZAKLINIONY WRNİK NA MIEJSCU



SZTYWNE, FORMOWANE
WKŁADKI POMAGAJĄ MOCNO
UTRZYMAĆ STOPE NA
MIEJSCU I PRZYMOCONAĆ PASKI
DO PŁYTY PODSTAWOWEJ

ZAPROJEKTOWANE W CELU
UŁATWIENIA ZBIORU
INFORMACJI POPRZECZ BADANIE
TKANKI ŁĄCZNEJ I STAWÓW
KOŃCZINY DAŁSZEJ U
KONIA.
"ZAPYTAJ KONIA..."



ELASTYCZNE,
DOPASOWANE
PASKI
WYGODNIE
UTRZYMUJĄ
STOPE



PODNOŚCENIE OBROTU ZOSTAŁO PRZEBADANE I
PRZETESTOWANE, ABY ZAPEWNIĆ NAJSKUTECZNIEJSZE WYNIKI

OPATENTOWANY W USA



KROSS
CHECK

Rekomendacje i kluczowe

korzyści

WSPARCIE DIAGNOSTYCZNE I URZĄDZENIE TESTOWE

KROSSCHECK™ TO URZĄDZENIE DO TESTOWANIA **RUCHU** U KONI,
KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE PRZEZ LEKARZY WETERYNARI I PROFESJONALNYCH KOWALI W CELU
WSPARCIA I UZUPEŁNIENIA WETERYNARYJNYCH ZAJĘĆ DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH.

ZALECANE ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA DO TESTOWANIA DŹWIGNI KROSSCHECK™:

- Leverage Testing uzupełnia aktualne techniki diagnostyczne stosowane w standardowym diagnostyce weterynaryjnej. Jest najbardziej skuteczny w połączeniu z diagnostycznymi blokadami nerwów, testami zgięcia, zdjęciami rentgenowskimi, ultrasonografią i rezonansem magnetycznym.
- Podobnie jak w przypadku diagnostycznych blokad nerwowych i testów zgięcia, test dźwigni może pomóc zlokalizować ból i dyskomfort, które najprawdopodobniej przyczyniają się do obecnego poziomu kulawizny. Jednak w przeciwieństwie do innych metod lokalizacji bólu, test dźwigni pozwala również odkryć, co poprawi komfort konia i złagodzi ból.
- Badanie dźwigniowe, stosowane przed diagnostyką obrazową (radiografia, USG lub MRI), może zapewnić bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące tego, na czym skupić badania obrazowe. Na przykład, nasze doświadczenie z udokumentowanymi przypadkami zebranyymi w ciągu ostatnich 2 lat powiązało spójne wyniki badania dźwigniowego z ostateczną diagnozą: uszkodzeń więzadeł pobocznych, uszkodzeń więzadeł trzeczkwatych pobocznych, uszkodzeń ścięgien zginaczy palców głębokich, choroby kości pierścieniowej i stawu kopytowego. Dzięki ciągłej dokumentacji wyników badania dźwigniowego, popartej potwierdzoną diagnozą, badanie dźwigniowe pozwoli na bardziej definitywną identyfikację patologii.
- Badanie dźwigniowe może pomóc potwierdzić, czy zmiany wykryte za pomocą określonych technik obrazowania rzeczywiście przyczyniają się do ostrej kulawizny, czy też zmiany te mają charakter przewlekły i nie są przyczyną bieżącej kulawizny.

WWW.KROSSCHECK.COM

DYSTRYBUTOR W USA PRZEZ EDSS, INC. (719) 372-7463 I W EUROPIE PRZEZ TFP, LTD. +44 (0) 1403-791000
OPATENTOWANY W USA

Prezentacja systemu Krosscheck - demonstracja testów