



Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:00

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/wkladka-katowa-2-5-do-podkowy-easyshoe-one-i-sticky-p-177.html>



Wkładka kątowna 2,5° do podkowy EasyShoe One i Sticky

Cena brutto	70,00 zł
Cena netto	56,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

Wkładka kątowna 2,5° do podkowy EasyShoe One i Sticky

Klin EasyShoe One Wedge zapewnia uniesienie pięty o 2,5 stopnia. Został zaprojektowany specjalnie do butów z linii EasyShoe One, w tym One Glue, One Nail i One Sticky. Rozmiar klina odpowiada rozmiarowi buta. Klin można łączyć ze sobą, aby uzyskać uniesienie pięty o 5 lub 7,5 stopnia. Przymocuj klin do buta za pomocą dołączonych śrub lub kleju Super Glue. Dostępne w rozmiarach 110-146 mm. Buty sprzedawane oddzielnie.

Uwaga: W przypadku EasyShoe One Nail konieczne jest wykonanie dwóch szybkich regulacji.

- 1) Usuń dołki na klinie za pomocą szczypiec lub ostrego noża.
- 2) Przytnij długość palców, aby dopasować ją do buta.

Tabela rozmiarów



EasyShoe One Wedge

Size	Width in mm	Length in mm
110	104-110mm	130mm
114	108-114mm	133mm
118	112-118mm	137mm
122	116-122mm	141mm
126	120-126mm	146mm
130	124-130mm	151mm
134	128-134mm	155mm
138	132-138mm	159mm
142	136-142mm	164mm
146	140-146mm	168mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 110 , 114 , 118 , 122 , 126 , 130 , 134 , 138 , 142 , 146

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:




Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

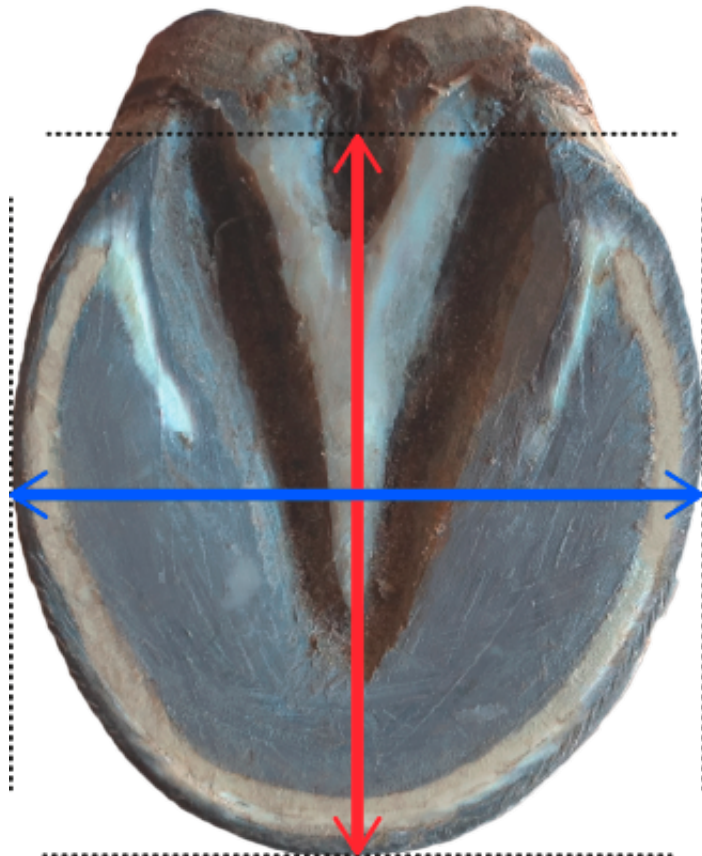

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

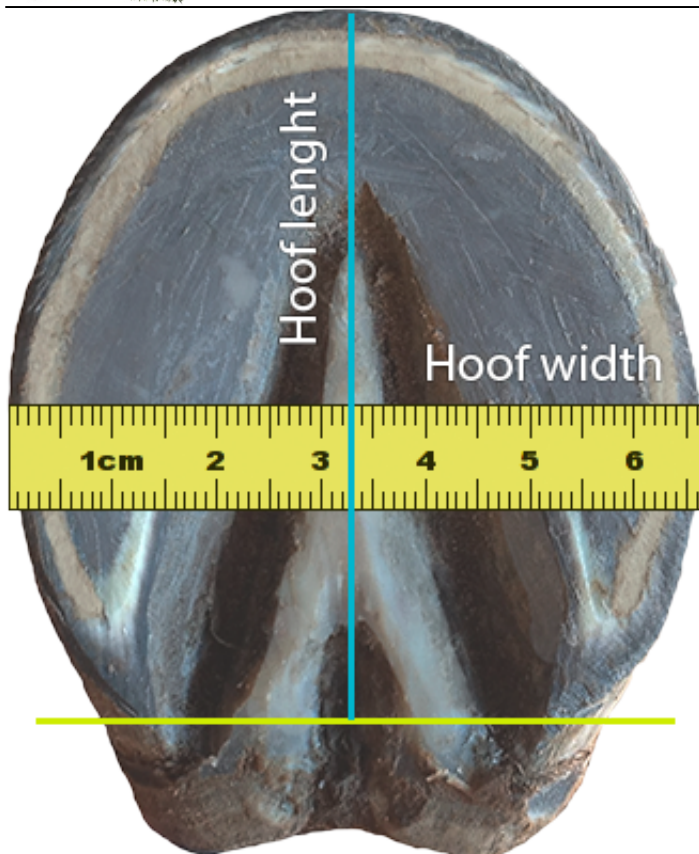


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

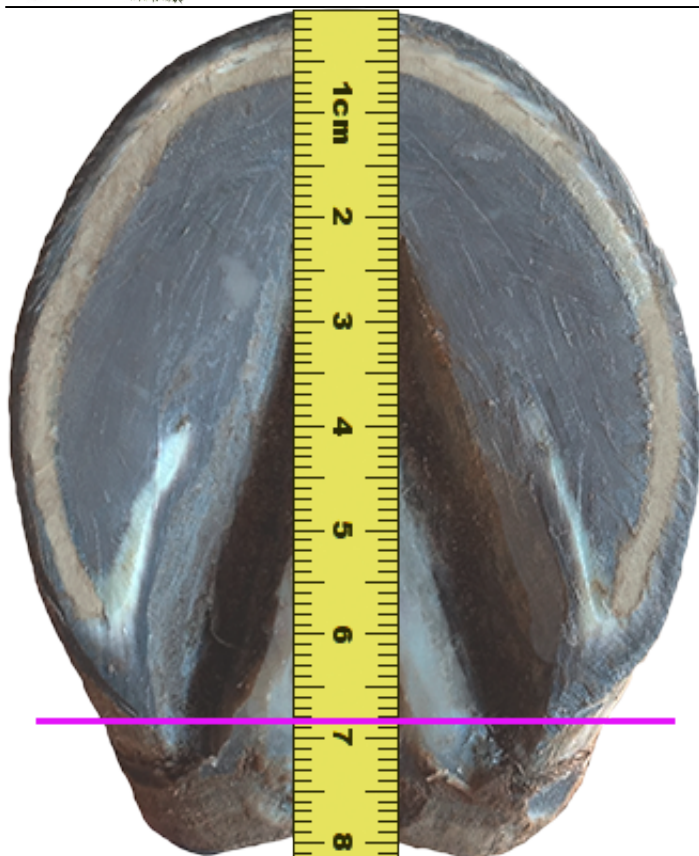

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Zakładanie klejonej podkowy Easyshoe One Glue i Sticky

Zdejmowanie podkowy Versa Grip Glue

Seria Versa Grip - prezentacja modelu i akcesoriów